

Guia Rápido

Centrífuga Digital para CGF/PRP/PRF – 12 Posições (CGF4-12)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

CENTRÍFUGA DIGITAL PARA
CGF/PRP/PRF – 12 POSIÇÕES (CGF4-12)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.23.
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Teclado.
- **Número de Posições do Rotor:** 12 Posições.
- **Semidiâmetro do Rotor:** 11,6 cm.
- **Direção da Rotação:** Para a direita (sentido anti-horário).
- **Força Centrífuga Relativa Máxima (RCF):** 2075xg.
- **Velocidade de Centrifugação:** 500 a 4.000 rpm, com incremento de 100 rpm.
- **Capacidade Máxima de Centrifugação:** Suporta até 12 tubos de centrifuga de 15 mL ou 12 tubos de coleta de sangue de 2/5/10 mL.
- **Temporizador:** 30s - 59min50s.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 60 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Função de Memorização de Programas:** Sim.
- **Proteção contra Superaquecimento:** Sim.
- **Dimensões do Produto:** 400 x 300 x 200 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 450 x 350 x 250 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 8,0 kg / 7,27 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Janela Visual.
- b) Dupla Trava Eletromagnética.
- c) Rotor.
- d) Pannel de Operação.
- e) Interruptor de Emergência.
- f) Adaptadores para Rotor.
- g) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Pressione a tecla **ABRIR** para abrir a tampa e colocar os tubos na centrífuga (**os tubos precisam estar balanceados e posicionados simetricamente**).
- III) Pressione a tecla **MENU** para ajustar o tempo, a velocidade e a temperatura de segurança.
- IV) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar ou parar o equipamento.
- V) Pressione a tecla **P** para memorizar múltiplos grupos de modos, recuperar modos salvos para execução e para utilizar os 4 programas integrados (CGF, PRP, A-PRF e I-PRF). No caso dos programas integrados, após a escolha pressione **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar o equipamento (**não utilize o adaptador amarelo de 2 mL ao usar o programa CGF**).

marTE
científica



comercial@marTE.com.br

(11) 3411-4500

@marTEcientífica